

Anleitung sicherer Probenversand



Wir können Ihnen verschiedene Arten von Probengefäßen mit Umgefäß und einer Saugeinlage für den sicheren Versand zur Verfügung stellen.

Das Innengefäß ist zur Hälfte mit 4% Formalin gefüllt.

Zur Anforderung von Versandmaterial verwenden Sie bitte unseren Anforderungsschein.

MVZ Institut für Pathologie Würselen - Aachen Anforderungsschein Versandmaterial
Anlage 3 zu AA Verpackung und Versand

In der Regel wird der Versand 2x in der Woche bearbeitet.
Wir bitten Sie höflichst unsere Bearbeitungszeit bei Ihrer Bestellung zu berücksichtigen!

Mengenangaben bitte faxen an:
02405/ 40903 91

MVZ Institut für Pathologie
Würselen - Aachen
Niederbardenberger Str. 21 A
52146 Würselen - Bardenberg

Genauere Anschrift / evtl. Station / Ansprechpartner /
Praxisstempel


Datum: _____

Versandmaterial	Stückzahl
Versandtaschen	
- bereits vor-frankiert (für den Postversand)	
- unfrankiert	
Formulare	
Einsendescheine / Antrag auf mikroskopische Begutachtung (90a)	
Einsendescheine Biopsien der Mamma (90b)	
Einsendescheine Intraoperativer Befund der Mamma (90c)	
Formular Anforderung Versandmaterial (350c)	
Gefäße	
Kleinste in kleinen „S“ (20ml in 35ml) für den Postversand	
Kleinste in kleinen „M“ (50ml in 100ml) für den Postversand	
kleine Gefäße (35 ml)	
Becher (100ml)	
mittlere Gefäße (400ml)	
große Gefäße (1200ml)	
Eimer (2-3 Liter)	
Eimer (3-5 Liter)	
Eimer (10 Liter)	
Gefäße mit Formalin gefüllt:	
Kleinste in kleinen „S“ (20ml in 35ml) für den Postversand	
Kleine 35ml	
Etiketten und Zubehör	
Etikett- für Patientennamen mit Gefahrstoffkennzeichnung	
Aufkleber für Gefäße – nur Gefahrstoffkennzeichnung	
Verschlüsse für Versandtaschen	
Versandgefäße zytologische Proben (30ml mit Umgefäß)	
Versandbehälter für Objektträger	
Objektträger	
Fixierspray	
Sonstiges:	


eingegangen am:

bearbeitet am / von:

Beim Versand per Post und Kurierdiensten ist die Verwendung einer Saugeinlage vorgeschrieben!

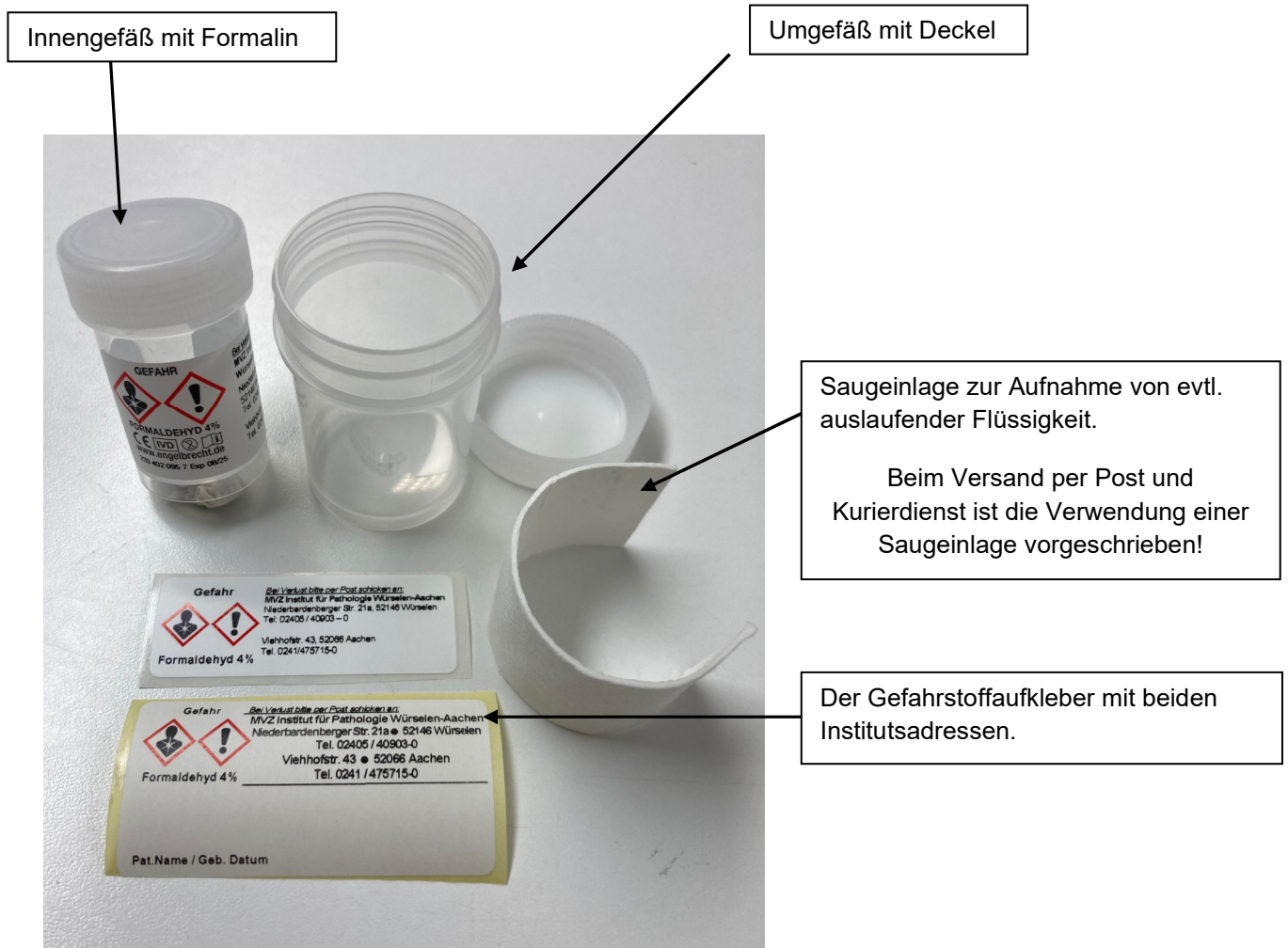

Bitte kennzeichnen Sie immer das Innengefäß unverwechselbar mit dem Patientennamen und weiteren notwendigen Angaben zur Probenzuordnung.

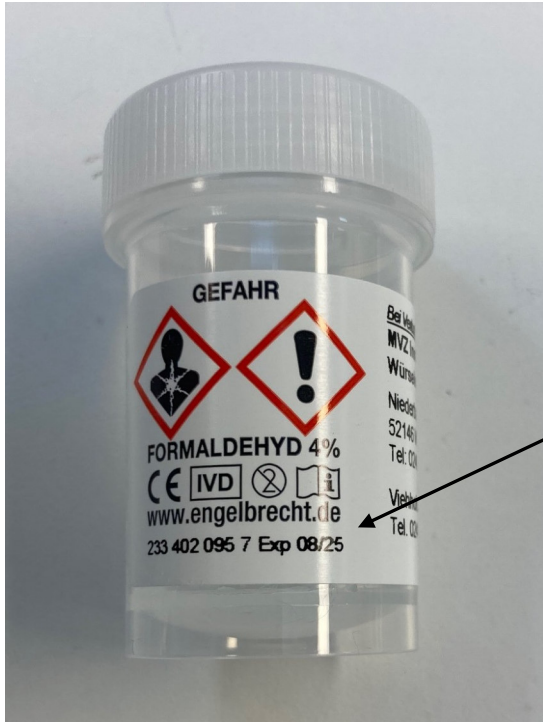

Auf dem Innengefäß stehen die Lotnummer und das Haltbarkeitsdatum des Formalins.



Gerne stellen wir Ihnen separate Patientenaufkleber zur Verfügung.



Für den Versand per Post oder Kurier werden diese Versandtaschen verwendet.

Sie können eine Versandtasche für mehrere Patientenproben (auch von unterschiedlichen Patienten) verwenden.



Bitte verschließen Sie die Versandtaschen ausschließlich mit den beiliegenden Kunststoffclips.

Bitte die Tüten nicht mit Heftklammern zutackern!



Sie wollen uns die Proben per Post zusenden?
Wir stellen Ihnen gerne frankierte Versandtaschen zur Verfügung.